

INSTRUCCIONES DE USO SET ESTÉRIL IIS

Situación: 2024-10

1828-190056-04

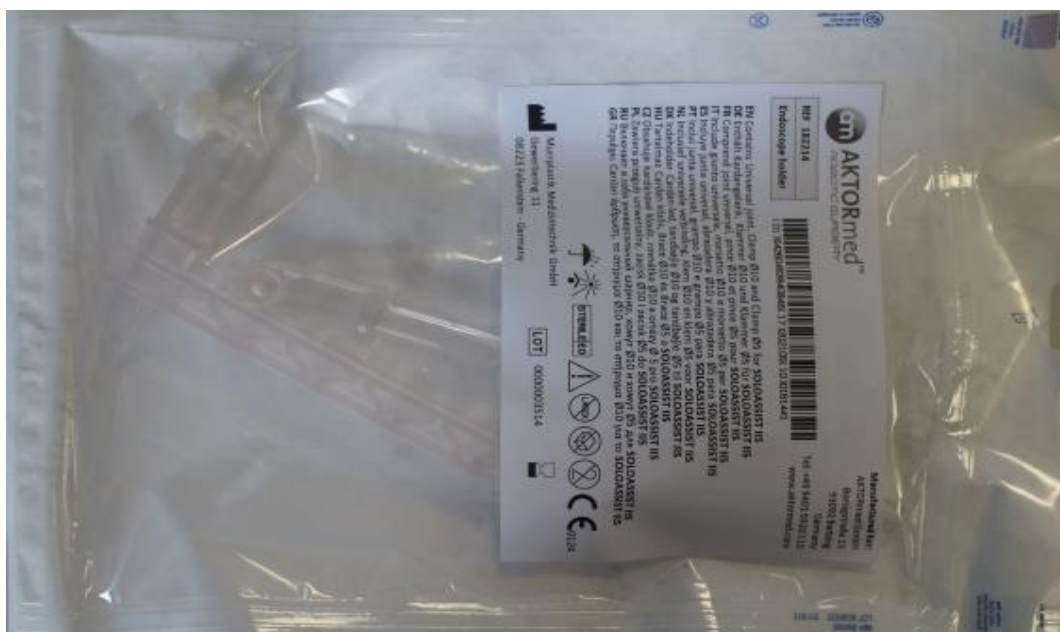


Figura 1: SOPORTE PARA ENDOSCOPIO REF 182214



Figura 2: FUNDA ESTÉRIL REF 6001-40001

Consulte el documento "Manual SOLOASSIST IIS - ES 1828-190040" para obtener información detallada sobre el funcionamiento del SOLOASSIST IIS.

Paso 1: Preparación de la FUNDA ESTÉRIL

| Paso | Descripción |
|---|---|
|  | Retire la ARTICULACIÓN CARDÁN, la ABRAZADERA Ø10 y la ABRAZADERA Ø5 del embalaje y prepárelas. |
|  | Presione las dos extremidades de la ABRAZADERA Ø10 y extraiga la ABRAZADERA Ø10 de la ARTICULACIÓN CARDÁN. |
|  | Retire una FUNDA ESTÉRIL del embalaje y prepárela. |
|  | Abra la FUNDA ESTÉRIL plegada en el centro (marcación de pegado con flecha azul). |
|  | Sujete la FUNDA ESTÉRIL con una mano. A través de la abertura en la parte elástica de la FUNDA ESTÉRIL introduzca el vástago de la ARTICULACIÓN CARDÁN. |
|  | Introduzca la ARTICULACIÓN CARDÁN. |
|  | Cubra el extremo delantero elástico de la FUNDA ESTÉRIL por encima de la unión cónica de la clavija de enchufe. |


| Paso | Descripción |
|---|---|
|  | Asegúrese de que la parte delantera elástica de la FUNDA ESTÉRIL se apoye como se muestra en la imagen. |

Tabla 1: Preparación de la FUNDA ESTÉRIL

Paso 2: Conecte la ARTICULACIÓN CARDÁN y cubra el brazo con la FUNDA ESTÉRIL


|  | Normalmente el revestimiento del SOLOASSIST IIS con la FUNDA ESTÉRIL se efectúa después de que la desinfección de la piel haya sido desinfectada, pero antes de cubrir al paciente de forma estéril. |
|---|---|
| Paso | Descripción |
|  | Introduzca en el brazo de extensión la ARTICULACIÓN CARDÁN con la FUNDA ESTÉRIL desde abajo. |
|  | Introduzca el vástago de la ARTICULACIÓN CARDÁN en el alojamiento del brazo de extensión, hasta que la articulación cardán encaje de forma audible. Compruebe que el encaje sea correcto, tirando de la ARTICULACIÓN CARDÁN. |
|  | Tome la FUNDA ESTÉRIL y colóquela sobre el brazo. |
|  | Sijete la FUNDA ESTÉRIL y cubra el brazo con ésta hasta abajo. Si es necesario, estire hacia abajo la longitud excesiva de la FUNDA ESTÉRIL. |

Tabla 2: Cobertura estéril

Después continúe con la cobertura estéril del paciente de acuerdo con el método habitual en su establecimiento.



Utilice solo la FUNDA ESTÉRIL original – REF 6001-40001 -, así como el SOPORTE DE ENDOSCOPIO original – REF 182214 -, que haya adquirido al fabricante o a un representante autorizado.

Paso 3: Montaje de la ABRAZADERA sobre el endoscopio

Seleccione la ABRAZADERA adecuada para el endoscopio. El SOPORTE PARA ENDOSCOPIO contiene una ABRAZADERA de Ø10 mm y una de Ø5 mm.

La **ABRAZADERA Ø10** puede alojar con seguridad todos los endoscopios con un diámetro exterior de **8 a 11 mm**.

La **ABRAZADERA Ø5** puede alojar con seguridad todos los endoscopios con un diámetro exterior de **4 a 6 mm**.

Póngase en contacto con nosotros si el endoscopio que utiliza tiene un diámetro exterior diferente.



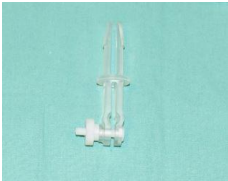
| Paso | Descripción |
|---|--|
|  | <p>Introduzca la ABRAZADERA Ø10 en el endoscopio y apriete manualmente la TUERCA MOLETEADA con firmeza.</p> <p>Apriete la TUERCA MOLETEADA solo lo necesario, de manera que el endoscopio todavía pueda girar con facilidad.</p> |
|  | <p>Si utiliza la ABRAZADERA Ø5, debe retirar el tornillo de la ABRAZADERA Ø10 e insertarlo en la ABRAZADERA Ø5.</p> |
|  | <p>Gire la TUERCA MOLETEADA sin apretar el tornillo. Ahora puede utilizar el endoscopio de Ø5 con la ABRAZADERA Ø5.</p> <p>Apriete la TUERCA MOLETEADA solo lo necesario, de manera que el endoscopio todavía pueda girar con facilidad.</p> |

Tabla 3: Montaje de la ABRAZADERA sobre el endoscopio

Paso 4: Aproximarse al PUNTO TROCAR y almacenarlo





| Paso | Descripción |
|--|---|
|  | Presione el pulsador (5) "Desbloqueo" y mueva la PUNTA DE Sonda de la ARTICULACIÓN CARDÁN hasta el punto de entrada del trocar en la pared abdominal. |
|  | <p>Presione el pulsador (1) "TP" en el campo de mando del SOLOASSIST IIS.</p> <p>Después de presionar el pulsador, recibirá una comunicación óptica. La indicación «Listo» (5) empieza a parpadear en verde, el PUNTO TROCAR se guarda.</p> |

Tabla 4: Fijación del PUNTO TROCAR

| | |
|---|--|
|  | ¡ATENCIÓN! Durante la aproximación al PUNTO TROCAR, el endoscopio no debe estar conectado con la ARTICULACIÓN CARDÁN. |
|  | Si ocurriera un corte de corriente o si durante la utilización del aparato la alimentación de tensión se desconectara accidentalmente, el PUNTO TROCAR se pierde y debe establecerse nuevamente. |

Paso 5: Fijación del endoscopio

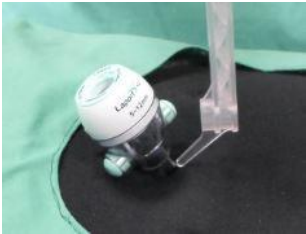

| Paso | Descripción |
|---|---|
|  | Mueva el SOLOASSIST IIS de forma tal que la ARTICULACIÓN CARDÁN quede próxima al endoscopio (óptica) ya introducido en el trocar y posicionado de forma aproximada. |
|  | Fije el endoscopio (óptica) colocando la ABRAZADERA en la ARTICULACIÓN CARDÁN. La ABRAZADERA encaja con un "clic". |

Tabla 5: Colocación del endoscopio

Paso 6: Finalizar la utilización

| Paso | Descripción |
|---|--|
|  | Retire el endoscopio (óptica) de la ARTICULACIÓN CARDÁN presionando las dos extremidades de la ABRAZADERA. |
|  | Afloje la TUERCA MOLETEADA y retire la ABRAZADERA del endoscopio. Deseche las ABRAZADERAS usadas (Ø10, Ø5) |
|  | Retire la ARTICULACIÓN CARDÁN del brazo tirando hacia abajo de la corredera de desbloqueo ubicadas a los lados. Deseche la ARTICUALCIÓN CARDÁN utilizada. |




| Paso | Descripción |
|--|--|
|  | <p>Deseche la FUNDA ESTÉRIL usada para cubrir el SOLOASSIST IIS.</p> <p>Coloque el SOLOASSIST IIS en posición vertical para su posterior almacenamiento en el CARRO.</p> |
|  | Desconecte todas las conexiones de cables y desenchufe la FUENTE DE ALIMENTACIÓN. |
|  | El SOLOASSIST IIS puede retirarse de la mesa de operaciones y almacenarse sobre el CARRO. |

Tabla 6: Finalizar la utilización







| Símbolo | Significado |
|---|---|
|  | Número de pedido |
|  | Cumplir lo indicado en los documentos adjuntos. |
|  | Se puede utilizar hasta |
|  | Esterilizado con óxido de etileno |
|  | Plenipotenciario en la Comunidad Europea |
|  | Representante autorizado en Suiza |
|  | No utilizar si el embalaje está dañado |
|  | No volver a esterilizar |
|  | No reutilizar |
|  | Sin látex |
|  | Almacenar en un lugar seco |
|  | Proteger de la luz solar |
|  | Fabricante |

Tabla 7: Símbolos para artículos desechables



AKTORMed GmbH
Neugablonzer Str. 13
D-93073 Neutraubling

Internet: www.aktormed.com

AKTORMed y SOLOASSIST son marcas registradas de AKTORMed GmbH